

Anziehanleitung Unterschenkelorthese

Schritt 1



Wickeln Sie ein Stück Anziehhilfe von der Rolle (zweifache Orthesenlänge). Wenden Sie diese um 180° (Innenseite nach außen) und ziehen Sie sie über das Bein bis oberhalb des Knies.

Schritt 2



Drehen Sie die Unterhülse über den Fuß nach oben.

Schritt 3



Legen Sie den Fuß in den Innenschuh und schließen Sie diesen. Ziehen Sie nun das restliche Stück der Anziehhilfe zurück über den Innenschuh.

Schritt 4



Positionieren Sie die Unterhülse auf dem Unterschenkel.

Schritt 5



Stecken Sie den Deckel unterhalb des Knies ein und verriegeln Sie diesen mit Hilfe des Klettverschlusses.

Mit Nürnberger Verschluss:

Fixieren Sie den Deckel mit den beiden Schrauben.



Schritt 6



Drehen Sie nun das Fußteil nach innen gekippt auf den Fuß.

Bei Klumpfuß:

Drehen Sie nun das Fußteil nach außen gekippt auf den Fuß.



Schritt 7



Schließen Sie den Klickverschluss an der Ferse sobald der Fuß gut im Fußteil sitzt.

Schritt 8



Stecken Sie die Adaption auf die Bolzen und drehen Sie beide Schrauben fest.